

BioBulk Fill con Biodentine


Tratamiento de caries profundas

Caso cortesía del Prof. Luc Martens y la Dra. Rita Cauwels

Tras la excavación del tejido cariado, en ocasiones la pulpa puede verse por transparencia o bien puede quedar al descubierto. Biodentine es un material de restauración que puede aplicarse directamente en la pulpa y que se ha demostrado que es superior al MTA, al CaOH y al Formocresol en numerosas publicaciones, proporcionando un excelente sellado, facilidad en su manipulación, fraguado rápido, propiedades antibacterianas y no tiñe el diente. Biodentine se puede utilizar para realizar la restauración BioBulk Fill sin necesidad de realizar acondicionamientos previos o sin utilizar ningún sistema de adhesión.



Paciente de 7 años al que se ha eliminado una caries en el 46. La cavidad profunda es muy cercana a la pulpa.

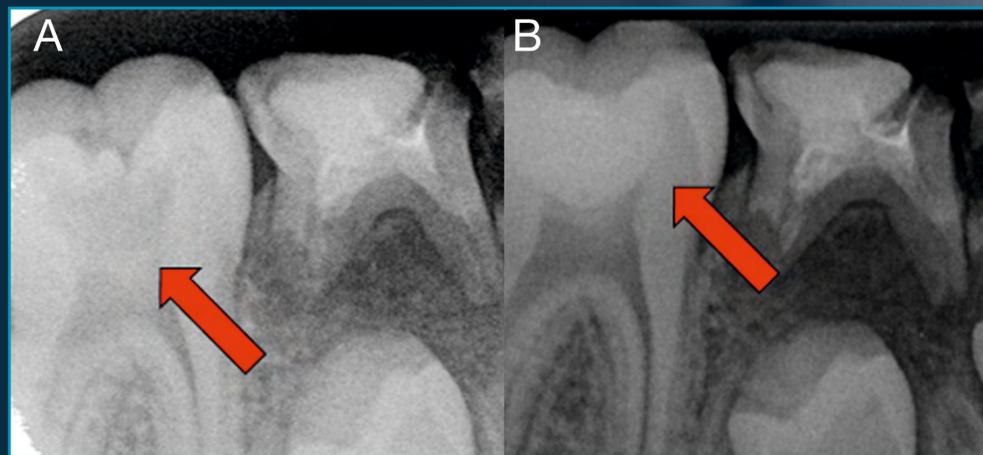

Se realiza un recubrimiento pulpar indirecto con Biodentine y el relleno de la cavidad mediante una técnica BioBulk Fill. Las radiografías A y B muestran la imagen antes y después del tratamiento.



Radiografía después del tratamiento.



Radiografía de seguimiento a 12 meses que demuestra que la formación radicular continúa.



www.septodont.es