

BioBulk Fill con Biodentine

Pulpotomía

Caso cortesía de Dr. Lucile Goupy, Francia

Esta indicación comprende pulpotomías en dientes deciduos y pulpotomías parciales en dientes definitivos. Además de sus propiedades de bioactividad que permiten la realización de la pulpotomía, la rapidez de fraguado de Biodentine permite una restauración inmediata de la corona. Asimismo también se puede dejar directamente en contacto con la cavidad bucal, sin miedo a que el material se deteriore.



Imagen clínica inicial del diente 55 de un paciente de 8 años de edad.



Durante el proceso de excavación de la caries, la pulpa queda al descubierto y esto requiere efectuar una pulpotomía cervical (pulpa vital, sin inflamación, hemostasia posible).



Se rellena la cavidad pulpar con Biodentine hasta la superficie oclusal.



Un mes más tarde se coloca una corona odontopediátrica.



La radiografía de seguimiento a los 3 meses muestra que no hay ninguna lesión perirradicular.

